



Gebrauchsanleitung

Wasserstoff-Inhalation mit

H2Master Sonderedition

Zusätzlicher Lieferumfang der Sonderedition

- A** Inhalationsschlauch mit **B** Nasenkanüle (Nasen“brille“),
- C** Inhalationskappe, **D** USB-Ladestecker

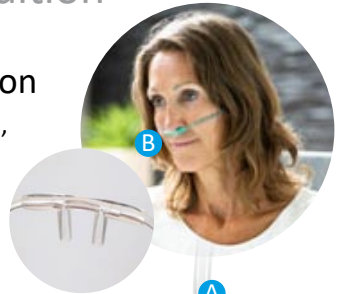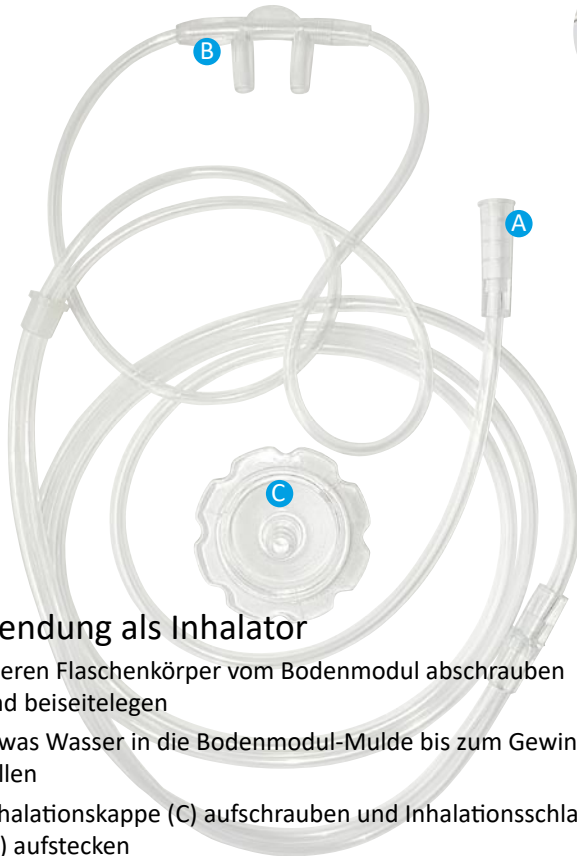

Anwendung als Inhalator

- 1 Leeren Flaschenkörper vom Bodenmodul abschrauben und beiseitelegen
- 2 Etwas Wasser in die Bodenmodul-Mulde bis zum Gewinde füllen
- 3 Inhalationskappe (C) aufschrauben und Inhalationsschlauch (A) aufstecken
- 4 Inhalationsschlauch mit Nasenkanüle/Nasenbrille (B) über den Ohren befestigen und Ausgänge der Nasenkanüle an den Nasenlöchern positionieren
- 5 Gerät wie gewohnt im 5 oder 10 Minutenmodus einschalten und zusätzlich zur Atemluft reinen Wasserstoff einatmen, Studien belegen die positive Wirkung

