



Gebrauchsanleitung Wasserstoff-Inhalation mit **H2Master** Sonderedition

Zusätzlicher Lieferumfang der Sonderedition

- A** Inhalationsschlauch mit **B** Nasenkanüle (Nasen“brille“),
- C** Inhalationskappe, **D** USB-Ladestecker

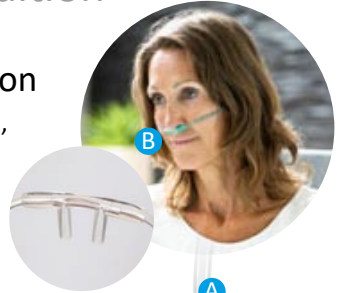

Anleitung und Video

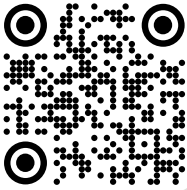


bestelements.de/manuals

« H2Master »

Anwendung als Inhalator

- 1 Leeren Flaschenkörper vom Bodenmodul abschrauben und beiseitelegen
- 2 Etwas Wasser in die Bodenmodul-Mulde bis zum Gewinde füllen • **Eine Füllung reicht für 2-3 Durchgänge**
- 3 Inhalationskappe (C) aufschrauben und Inhalationsschlauch (A) aufstecken
- 4 Inhalationsschlauch mit Nasenkanüle/Nasenbrille (B) über den Ohren befestigen und Ausgänge der Nasenkanüle an den Nasenlöchern positionieren
- 5 Gerät wie gewohnt im 5 oder 10 Minutenmodus einschalten und zusätzlich zur Atemluft reinen Wasserstoff einatmen.
Mulde nicht austrocknen lassen!

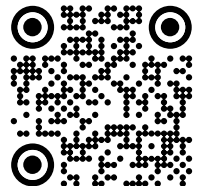

Studien belegen die positive Wirkung
bestelements.de/studien QR-Code 